

ActivElbow™ applica una pressione per alleviare il dolore dell'epicondilita (gomito del tennista) e per proteggere il gomito.



Posizionare **ActivElbow™** intorno al braccio con la pelotta posizionata leggermente sul punto di pressione/critico principale. Fissare la fascia in velcro per il massimo comfort. Il tutore è unisex e fornito in taglia unica.

Rimuovere la pelotta per procedere al lavaggio. Lavare a mano ad una temperatura al di sotto dei 30°. Utilizzare detergenti neutri che non contengano sbiancanti o candeggina. Asciugare all'aria aperta, lontano dalla luce diretta del sole. Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Non lavare a secco. Non utilizzare candeggina.

Attenzione

- Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli previsti nelle presenti istruzioni in quanto potrebbe causare danni o lesioni
- Non indossare il prodotto mentre si dorme
- Assicurarsi che il velcro non aderisca agli indumenti, in quanto potrebbe danneggiarli
- Il prodotto contiene fibre sintetiche. Se irrita la pelle, smettere immediatamente di indossarlo e consultare un medico
- Se si continuano ad avere dolori dopo l'utilizzo del prodotto, la causa potrebbe non essere l'epicondilite (gomito del tennista). Pertanto, smettere immediatamente di indossare il tutore e consultare un medico



Prodotto realizzato a mano in Giappone da:

 Daiya Industry Company, Ltd.

 1117-1 Koshinden, Minami-Ku Okayama 701-0203
Giappone

Distribuito nel Regno Unito, in Europa e Australia da:

 **Gower**
Health & Fitness
Solutions

271 High Street, Berkhamsted HP4 1AA
Regno Unito
info@activsupports.com