

ActivElbow™ applique une pression pour soulager les douleurs liées au tennis elbow et protéger votre coude.



Installez **ActivElbow™** autour du bras, en plaçant le coussinet légèrement en avant du point de pression/douleur principal. Serrez/ajustez avec la bande velcro pour assurer une pose confortable. Unisexe. Taille unique.

Retirer le coussinet pour le laver. Laver à la main à moins de 30°C. Utiliser un détergent neutre sans agents de blanchiment. Laisser sécher dans un endroit bien aéré et à l'écart de la lumière directe du soleil. Ne pas sécher en machine. Ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, ne pas utiliser d'eau de Javel, clean or bleach.

Avvertissement :

- Utiliser ce produit en se conformant strictement aux instructions figurant dans ce mode d'emploi, sous peine de risques de dommages ou blessures
- Ne pas porter le produit pendant le sommeil
- Veiller à ce que la fixation velcro ne colle pas aux vêtements, sans quoi ceux-ci pourraient être abîmés
- Ce produit contient des fibres chimiques. Si le produit irrite la peau, cesser immédiatement de le porter et consulter un médecin
- Si les douleurs ne cessent pas après utilisation de ce produit, cela peut indiquer un autre problème autre que le tennis elbow, auquel cas il conviendra de cesser d'utiliser le produit et de consulter un médecin



Fabriqué à la main au Japon par :



Daiya Industry Company, Ltd.



1117-1 Koshinden, Minami-Ku Okayama 701-0203 Japon

Distribué au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Australie par :



271 High Street, Berkhamsted HP4 1AA
Royaume-Uni
info@activsupports.com